

Link do produktu: <https://esilver.eu/pianka-do-szybkiej-dezynfekcji-i-mycia-bez-alkoholu-velox-foam-extra-5l-p-1633.html>



## Pianka do szybkiej dezynfekcji i mycia bez alkoholu Velox Foam Extra 5L

Cena brutto	<b>198,48 zł</b>
Cena netto	<b>183,78 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-2 dni robocze</b>
Kod produktu	<b>ML412</b>

### Opis produktu

#### Pianka do szybkiej dezynfekcji i mycia VELOX FOAM EXTRA 5L

Gotowa do użycia pianka do dezynfekcji różnorodnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych m.in. ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego. Szczególnie przydatna na oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów i lamp zabiegowych. Nie zawiera aldehydów i fosforanów, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada wysoką tolerancję materiałową na tworzywo sztuczne ABS i materiały obciowe oraz bardzo przyjemny, cytrusowy zapach.

Płyn do stosowania w obszarze medycznym, domach opieki, salonach fitness i SPA, gabinetach kosmetycznych i masażu oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością - **jako produkt biobójczy.**

- bezalkoholowa pianka
- gotowa do użycia
- działa już od 1 minuty
- szerokie spektrum mikrobójcze: bakterie, prątki, grzyby, wirusy
- przyjemny, cytrusowy zapach
- nie zawiera aldehydów i fosforanów
- nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni
- wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obciowe
- pojemność: 5 litrów
- produkt zawiera deklaracje zgodności UE
- posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym
- produkt przeznaczony do powszechnego stosowania
- typ wyrobu medycznego: wyposażenie wyrobu medycznego lub produkt niemający przewidzianego zastosowania medycznego

Spektrum	Normy wg EN 14885	Obciążenie organiczne	
		niskie	wysokie
<b>Bakterie</b> (w tym MRSA)	EN 13727	1 min.	1 min.
<b>Grzyby</b> ( <i>C. albicans</i> )	EN 13624	1 min.	1 min.
<b>Prątki gruźlicy</b> ( <i>M. terrae</i> )	EN 14348	5 min.	10 min.
<b>Wirusy otoczkowe</b> (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV,	EN 14476	1 min.	1 min.

---

Herpes simplex, Ebola)			
------------------------	--	--	--

**Skład:**

Substancje czynne w 100 g produktu: 0,15 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, 0,14 g masa poreakcyjna propionianu N,N-didecylo-N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu i propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-hydroksyetoksy)etylo)-N-metyloamonu oraz propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-(2-hydroksyetoksy)etoksy)etylo)-N-metyloamonu

**Uwaga:**

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

