

Link do produktu: <https://esilver.eu/plyn-do-dezynfekcji-powierzchni-na-bazie-alkoholu-grejpfrutowy-velox-spray-top-af-5l-p-1628.html>



## Płyn do dezynfekcji powierzchni na bazie alkoholu grejpfrutowy Velox Spray TOP AF 5L

Cena brutto	<b>171,40 zł</b>
Cena netto	<b>158,70 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-2 dni robocze</b>
Kod produktu	<b>ML931</b>

### Opis produktu

#### Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni VELOX SPRAY 5L grejpfrutowy

Gotowy do użycia, środek na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego, foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej oraz innych trudno dostępnych powierzchni, a tak że powierzchni mających kontakt z żywnością. Posiada przyjemny zapach grejpfruta. Zalecany jest również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz protez i wycisków silikonowych. Preparat nie zawiera aldehydu i fenolu dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt uzyskał pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka.

- przebadany zgodnie z nowymi normami dla środków dezynfekcyjnych (EN 14885)
- szerokim spektrum mikrobójcze : bakterie, prątki, grzyby, wirusy w czasie 30 sekund
- nie zawiera aldehydu i fenolu
- zapach grejpfrutowy
- preparat gotowy do użycia
- gwarancja skuteczności i bezpieczeństwo stosowania
- nie odbarwia powierzchni
- wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo sztuczne (ABS) i materiały obiciowe
- produkt zawiera deklaracje zgodności UE
- posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym
- produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania.
- typ wyrobu medycznego: wyposażenie wyrobu medycznego lub produkt niemający przewidzianego zastosowania medycznego

Spektrum	Normy wg EN 14885	Obciążenie organiczne	
		niskie	wysokie
<b>Bakterie</b> (w tym MRSA)	EN 1276	30 sek.	1 min.
	EN 13967	30 sek.	1 min.
	EN 13727	30 sek.	
<b>Grzyby</b> (C. albicans)	EN 1650	30 sek.	1 min.
	EN 13624	30 sek.	
<b>Prątki gruźlicy</b> (M. terrae)	EN 14348	30 sek.	1 min.
<b>Wirusy otoczkowe</b> (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola)	RKI/DVV	30 sek.	30 sek.
<b>Wirus Rota</b>	EN 14476	30 sek.	
<b>Wirus Adeno</b>	EN 14476	1 min.	

#### Sposób użycia:

---

Spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm. dbając o całkowite jej pokrycie. Powierzchnia nie wymaga spłukania wodą, wysycha szybko nie pozostawiając smug. Nie stosować na powierzchnie wrażliwe na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe)

**Skład:**

Substancja czynna w 100 g produktu: 63,7 g etanol, 6,3 g propan-2-ol

**Uwaga:**

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

