

Link do produktu: <https://esilver.eu/srodek-do-dezynfekcji-powierzchni-velox-spray-neutral-5l-p-2841.html>

Środek do dezynfekcji powierzchni Velox Spray Neutral 5L

Cena brutto	169,16 zł
Cena netto	156,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Kod produktu	ML697

Opis produktu

Preparat do dezynfekcji małych powierzchni VELOX SPRAY NEUTRAL 5L

Gotowy do użycia środek przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych tj: łóżko, fotel zabiegowy, aparatura medyczna i nieinwazyjny sprzęt operacyjny, sprzęt rehabilitacyjny. Polecany również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych. Preparat nie zawiera aldehydu i fenolu. Odpowiednio dobrane składniki gwarantują szerokie spektrum bójcze w bardzo krótkim czasie oraz idealną czystość bez smug. Jest szczególnie polecany do szklanych i błyszczących powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Jest łagodniejszy niż Velox Top AF.

- działa już od 15 sekund
- szerokie spektrum mikrobójcze
- nie pozostawia smug i zacieków
- neutralny zapach
- preparat gotowy do użycia
- gwarancja skuteczności i bezpieczeństwo stosowania
- nie odbarwia powierzchni
- pojemność 5 litrów
- do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością
- produkt zawiera deklaracje zgodności UE
- posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym
- produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania
- typ wyrobu medycznego: wyposażenie wyrobu medycznego lub produkt niemający przewidzianego zastosowania medycznego

Spektrum	Normy wg EN 14885	Obciążenie organiczne	
		niskie	wysokie
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	30 sek.	30 sek.
Grzyby (<i>C. albicans</i>)	EN 13624	15 sek.	15 sek.
Prątki gruźlicy (<i>M. terrae</i>)	EN 14348	30 sek.	30 sek.
Wirusy otoczkowe (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola)	EN 14476	30 sek.	1 min.
Wirus Rota	EN 14476	30 sek.	1 min.
Wirus Adeno	EN 14476	1 min.	30 sek.

Produkt posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze oraz bójcze wobec prątków gruźlicy, ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa, Norowirusa) oraz bójcze wobec wirusów ostonkowych (w tym Vaccinia, BVDV, koronawirusy, HIV, HBV, HCV).

Sposób użycia:

Spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm dbając o całkowite jej pokrycie. Odczekać 30 sekund. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością należy spłukać je wodą pitną. Pozostałe powierzchnie nie wymagają spłukania wodą. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe). Po użyciu zamknąć szczelnie opakowanie.

Skład:

Substancja czynna w 100 g produktu: 63,7 g etanol, 6,3 g propan-2-ol

Uwaga:

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

